



# Bruksanvisning Linus vest




Bilde 1.  
Putt ernæringsposen  
i lommen på innsiden  
av vesten.



Bilde 2.  
Koble slangesettet  
sammen med  
ernæringsposen, og fyll  
slangesettet med  
ernæring.



Bilde 3.  
Gjør slangesettet  
mellom ernærings-  
posen og pumpen så  
kort som mulig, og  
koble ernæringsettet  
sammen med pumpen.

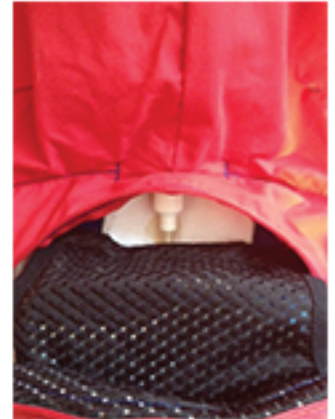

Bilde 4.  
Putt pumpen ned i  
nettingposen, og lukk  
borrelåsen på hver side.



Bilde 5.  
Putt slangesettet gjen-  
nom hullet på høyre  
side av nettinglommen.



Bilde 6.  
Trekk ut ønsket lengde  
på ernæringsettet.



Bilde 7.  
Tre slangesettet  
gjennom hengen som  
vist.



Bilde 8.  
Koble slangesettet til  
Knapp/PEG, enten ved å  
ha slangesettet på  
utsiden eller på  
innsiden av beltet for  
mer beskyttelse.

**Overflødig slangesett legges i lommen bak.  
Pass på at slangesettet ikke kommer i klem.**